

maintenance et nettoyage

Maintenance :

- les barrières sécuris BL3170 sont en acier revêtues de peinture époxy ne nécessitent pas de maintenance particulière. Contrôler régulièrement le bon serrage des fixations, le système de verrouillage et son mécanisme. HMS-VILGO conseille un entretien régulier au minimum 1 fois par année.

Nettoyage :

- nettoyer à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide. Utiliser des détergents ordinaires. sécher.
- ne jamais utiliser d'acides, d'alcalins ou de solvants tels que l'acétone ou diluants cellulosiques.

Attention :

- ⚠ - vérifier que les barrières latérales aient été correctement fixées et verrouillées.
- lors du montage et de l'utilisation des barrières, prendre garde à ne pas se pincer les doigts.

Garantie :


La barrière BL3170 est garantie 5 ans après sa vente. la garantie s'applique uniquement pour les défauts de fabrication.

Restrictions :

La garantie ne prend pas en comptes :

- mauvaise utilisation, stockage ou utilisation induue.
- usure normale due à l'utilisation du produit.
- mauvaise conservation et stockage
- démontage, réparation ou modification du produit par d'autres personnes non autorisées.
- HMS-VILGO ne peut être tenu responsable de dommages provoqués par une utilisation incorrecte ou non prévue dans le présent manuel.

composants et leurs fonctions

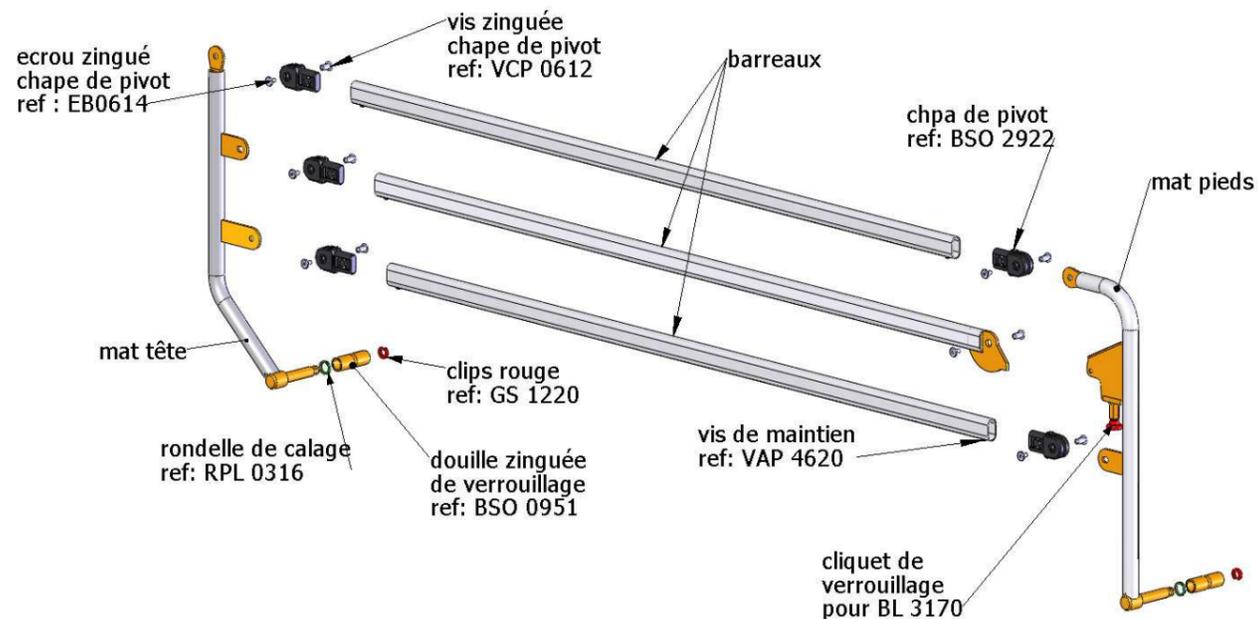


Accessoires :

Vous devez utiliser des pièces détachées HMS-Vilgo ; disponibles chez tous les distributeurs HMS-VILGO. pour toutes réparations, veuillez vous adresser à votre distributeur qui se chargera de retourner votre barrière au SAV HMS-Vilgo.



Barrières de lit Sécuris : BL3170

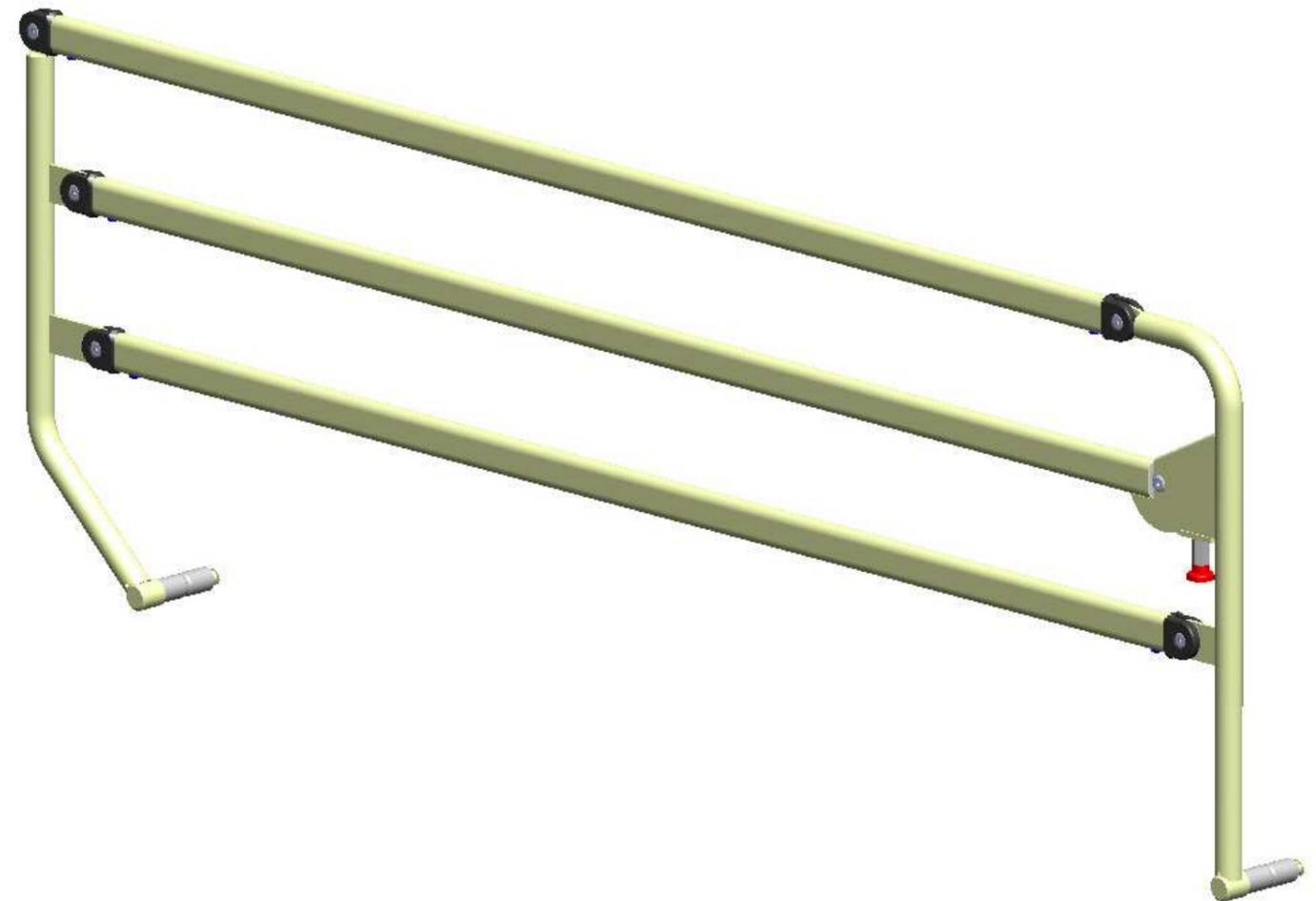

CE NF EN 1970-A1 & NF EN 60 601-2-52

Certificat de conformité Apave Sudeurope no 6004043-001 du 14-10-11.

Notice de montage et d'utilisation LIT MEDICALISE

Édition 2012/04

Les barrières Sécuris BL3170 pour les soins, le maintien et l'hospitalisation à domicile, est un dispositif de classe 1 (Directive 93/42, consolidée 2007/47).



Elles sont conçues et fabriquées dans le respect des normes françaises et européennes homologuées NF EN 1970 A1 et NF EN 60601-2-52

L'activité conception, fabrication, réparation et vente est certifiée par TUV selon ISO 9001-2008

! Sécurité :

- L'utilisation des barrières doit se faire sur prescription médicale.
- L'utilisation pour les patients avec une anomalie atypique peut créer des risques de blessure.
- Cette barrière latérale a été conçue pour des patients avec une taille adulte typique ; ne pas utiliser ce produit pour des enfants de moins de 12 ans ou pour des patients avec une anatomie atypique. Tout enfant de moins de 12 ans, à proximité de ce produit doit être surveillé afin d'éviter tout risque potentiel d'accident.
- la barrière doit être manipulée avec précaution lorsque le patient est dans le lit.
- HMS-VILGO décline toute responsabilité en cas d'usage, changement, assemblage de la BL3170 différents de ceux indiqués.
- il existe un risque de pincement pendant l'opération de pliage de la barrière.
- ne jamais forcer ou lâcher la barrière durant sa manipulation.
- Suivre les recommandations de l'AFSSAPS (16/06/2010) sur l'utilisation des barrières de lit avec les lits.
- La barrière Sécuris BL 3170 ne doit pas être utilisée avec un patient de plus de 135Kg.
- Ne pas appliquer un poids de plus de 75 Kg sur le barreau supérieur de la barrière.
- HMS-VILGO interdit l'utilisation des barrières Sécuris BL 3170 sur d'autres marques de lits.
- HMS-VILGO interdit l'utilisation d'autres marques de barrières sur des lits HMS-VILGO.

Caractéristiques techniques :

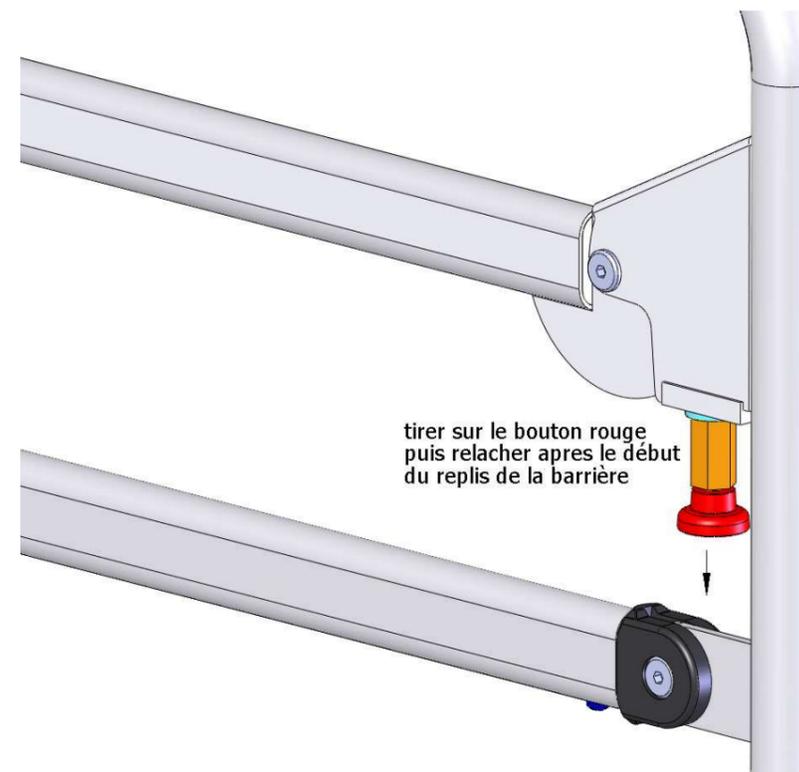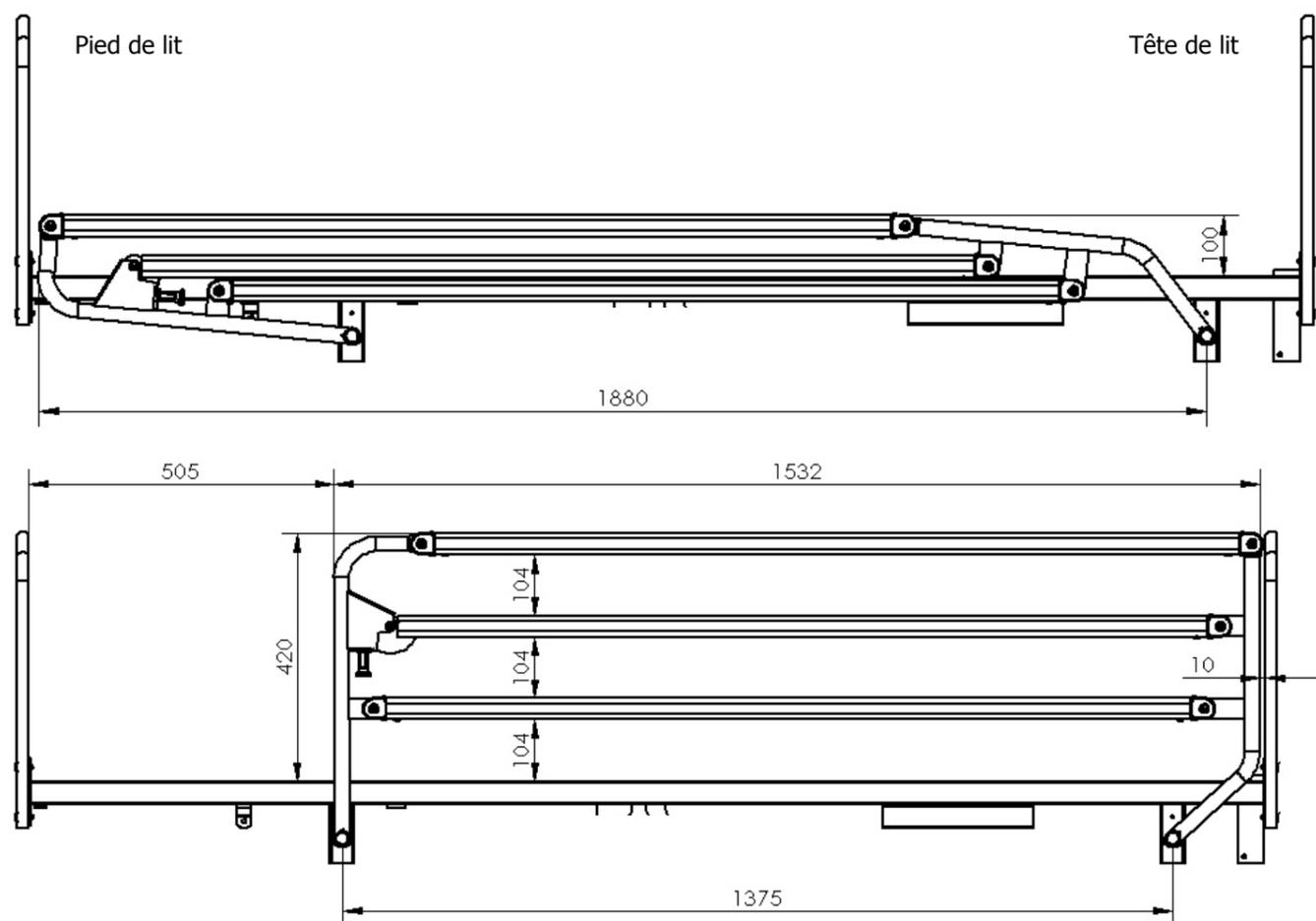

Montage et installation sur lits HMS-Vilgo

➤ Déballage

Si l'emballage s'avère être endommagé à la réception : chaque barrière doit être examinée afin de détecter les défauts apparents. En cas de dommage, veuillez contacter HMS-VILGO.

➤ Instructions d'assemblage

La barrière est fournie entièrement montée et prête à être installée sur le lit. Aucun outil n'est nécessaire à son installation.

- Placer les deux axes zingues blanc de la barrière dans les « supports sécuris » prévues à cet effet, en positionnant le bouton de verrouillage en pied de lit.
- Vérifier que la douille zinguée soit enfoncée à fond de butée dans le « support sécuris »
- Ne pas effectuer un serrage suffisant peut provoquer un risque de chute de la barrière, voir une chute du patient.
- Faire quelques manipulations afin de vérifier le bon fonctionnement de la barrière Sécuris BL3170.



Assurez vous du parfait fonctionnement du verrouillage en appliquant un mouvement alternatif longitudinal à la barrière.

➤ Instructions d'utilisation

1. Pour abaisser la barrière Sécuris BL 3170
Tirer sur le bouton rouge de déverrouillage et commencer simultanément à abaisser la barrière. Relâcher le bouton durant la manipulation, et replier la barrière jusqu'en butée basse.



Attention à ne pas pincer le patient au cours de cette étape.

2. Pour lever la barrière Sécuris BL 3170

Prendre la barrière par son barreau supérieur et la lever jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans le système de verrouillage.



Attention à ne pas pincer le patient au cours de cette étape.